




Dr. Arabin GmbH & Co. KG

Alfred-Herrhausen-Str. 44 | D · 58455 Witten

T +49 (0)2302 189214 | F +49 (0)2302 189216

www.dr-arabin.de | Email: info@dr-arabin.de

Produktübersicht

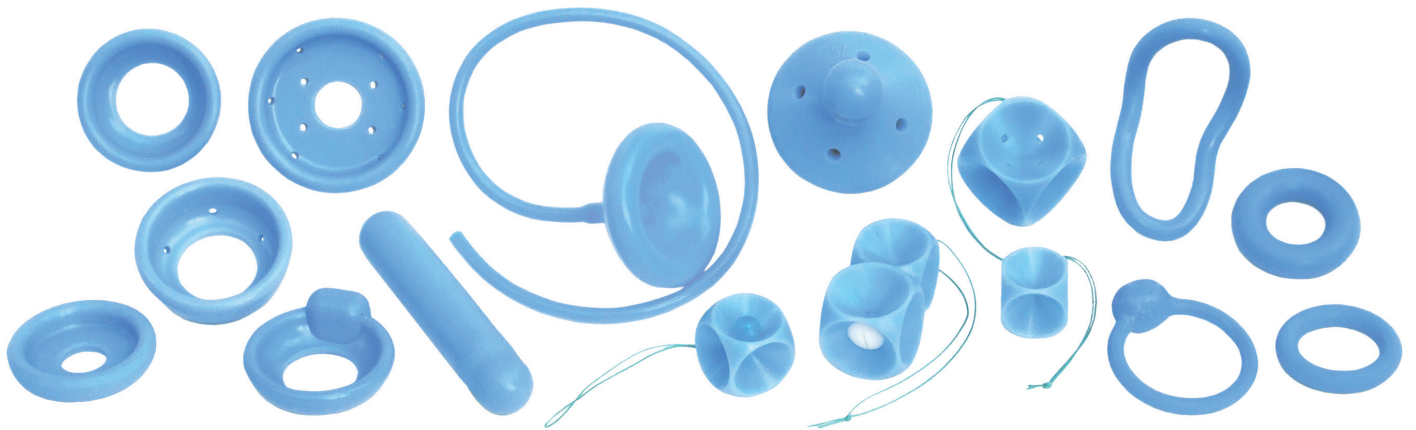

Alle *Original* Dr. Arabin Pessare bestehen aus verträglichem Silikon.

Jedes Pessar ist nur zur Anwendung an einer Patientin bestimmt.


Das Material ist mit aldehydischen Desinfektionsreinigern kompatibel (z.B. Gigasept FF neu) und geeignet für Dampfsterilisation bis 134°C/3,8 bar bzw. Heißluftsterilisation bis 250°C.

Es sollte prinzipiell das Pessar mit dem kleinsten Umfang eingelegt werden, das hält.

Der Erfolg der Pessar-Therapie hängt von der ordnungsgemäßen Anpassung und einem regelmäßigen Wechsel ab.

Die zunehmende Eigenverantwortlichkeit der Patientin sowie die Verpflichtung des Arztes, sich für eine minimal invasive, kostengünstige und doch effektive Therapie zu entscheiden, spielen dabei eine wesentliche Rolle.

Als Service stehen Ihnen für besondere Fragen und Beratung erfahrene Frauenärzte unter info@dr-arabin.de zur Verfügung.

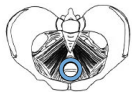

Ring Pessare

Größe	Artikel Nr.	Pharma-Nr.	Informationen zum Pessar
50 mm	R 050	PZN: 480 61 19	Indikation: Stressinkontinenz, leichte Senkungsbeschwerden. Ein tragfähiger Beckenboden ist Voraussetzung. Durch Reposition der Senkung und suburethrale Stützwirkung kann der Ring einer Stressinkontinenz vorbeugen.
55 mm	R 055	PZN: 480 61 25	
60 mm	R 060	PZN: 480 61 31	
65 mm	R 065	PZN: 480 61 48	
70 mm	R 070	PZN: 480 61 54	
75 mm	R 075	PZN: 480 61 60	
80 mm	R 080	PZN: 480 61 77	
85 mm	R 085	PZN: 480 61 83	
90 mm	R 090	PZN: 480 62 08	
95 mm	R 095	PZN: 480 62 14	
100 mm	R 100	PZN: 480 62 20	



Dicker Ring

Größe	Artikel Nr.	Pharma-Nr.	Informationen zum Pessar
50 mm	DR 050	PZN: 480 62 37	Indikation: Stressinkontinenz, leichte Senkungsbeschwerden. Der Dicke Ring besitzt keinen Stahlfederkern, hat aber einen größeren Umfang. Die Auflagefläche wird vergrößert und die Gefahr für Drucknekrosen verringert. Ein tragfähiger Beckenboden ist Voraussetzung.
55 mm	DR 055	PZN: 480 62 43	
60 mm	DR 060	PZN: 480 62 66	
65 mm	DR 065	PZN: 480 62 72	
70 mm	DR 070	PZN: 480 62 89	
75 mm	DR 075	PZN: 480 62 95	
80 mm	DR 080	PZN: 480 63 03	
85 mm	DR 085	PZN: 480 63 26	
90 mm	DR 090	PZN: 480 63 32	
95 mm	DR 095	PZN: 480 63 49	
100 mm	DR 100	PZN: 480 63 55	



Schalen Pessar

Größe	Artikel Nr.	Pharma-Nr.	Informationen zum Pessar
55 mm	SP 055	PZN: 480 64 50	Indikation: Stressinkontinenz, leichte Senkungsbeschwerden. Ein (wenn auch vermindert) tragfähiger Beckenboden ist Voraussetzung.
60 mm	SP 060	PZN: 480 64 67	
65 mm	SP 065	PZN: 480 64 73	
70 mm	SP 070	PZN: 480 64 96	
75 mm	SP 075	PZN: 480 65 04	
80 mm	SP 080	PZN: 480 65 10	
85 mm	SP 085	PZN: 480 65 27	
90 mm	SP 090	PZN: 480 65 33	
95 mm	SP 095	PZN: 852 66 70	



Siebschalen Pessar

Größe	Artikel Nr.	Pharma-Nr.	Informationen zum Pessar
55 mm	SSP 055	PZN: 480 65 56	Indikation: Stressinkontinenz, leichte Senkungsbeschwerden. Siebschalen Pessare entsprechen den Schalen Pessaren, besitzen jedoch eine Anzahl von Löchern, die das Abfließen von Sekret erleichtern.
60 mm	SSP 060	PZN: 480 65 62	
65 mm	SSP 065	PZN: 480 65 79	
70 mm	SSP 070	PZN: 480 65 85	
75 mm	SSP 075	PZN: 480 65 91	
80 mm	SSP 080	PZN: 480 66 16	
85 mm	SSP 085	PZN: 480 66 22	
90 mm	SSP 090	PZN: 480 66 39	
95 mm	SSP 095	PZN: 063 39 17	



Würfel Pessar

Größe	Artikel Nr.	Pharma-Nr.	Informationen zum Pessar
25 mm	WP 0	PZN: 480 54 62	Indikation: Stressinkontinenz, verschiedene Grade der Scheiden- und Gebärmuttersenkung. Der Saugnapfeffekt der konkaven Flächen bewirkt die Haftung auch bei schweren Senkungen und geringer Stabilität des Beckenbodens.
29 mm	WP 1	PZN: 480 54 79	
32 mm	WP 2	PZN: 480 54 85	
37 mm	WP 3	PZN: 480 54 91	
41 mm	WP 4	PZN: 480 55 16	
45 mm	WP 5	PZN: 480 55 22	



Würfel Pessar mit Knopf

Größe	Artikel Nr.	Pharma-Nr.	Informationen zum Pessar
25 mm	WPK 0	PZN: 852 66 87	Indikation: Stressinkontinenz, verschiedene Grade der Scheiden- und Gebärmuttersenkung. Würfel Pessare mit Knopf entsprechen den Würfel Pessaren, besitzen jedoch mittig einen Kunststoffknopf, in den der Faden eingegossen ist.
29 mm	WPK 1	PZN: 852 66 93	
32 mm	WPK 2	PZN: 852 67 01	
37 mm	WPK 3	PZN: 852 67 18	
41 mm	WPK 4	PZN: 852 67 24	
45 mm	WPK 5	PZN: 852 67 30	



Würfel Pessar perforiert mit Knopf

Größe	Artikel Nr.	Pharma-Nr.	Informationen zum Pessar
25 mm	WPLK 0	PZN: 063 38 86	Indikation: Stressinkontinenz, verschiedene Grade der Scheiden- und Gebärmuttersenkung. Würfel Pessare mit Perforation entsprechen Würfel Pessaren, sind jedoch zusätzlich perforiert, um den Ablauf von Sekret und das Wechseln zu erleichtern.
29 mm	WPLK 1	PZN: 063 38 57	
32 mm	WPLK 2	PZN: 063 38 34	
37 mm	WPLK 3	PZN: 063 38 28	
41 mm	WPLK 4	PZN: 063 38 11	
45 mm	WPLK 5	PZN: 063 38 05	



Würfel Pessare eignen sich auch zur Narbenauflockerung und Erweiterung von Scheidenstenosen in Kombination mit lokalen Östrogenpräparaten bei Miktions- oder Kohabitationsbeschwerden und vor geplanten Operationen.



Bei isoliertem Descensus werden kleine Pessare eher im proximalen Vaginaldrittel (Abb. oben), bei zusätzlicher Zysto-Rektozele eher größere Pessare (ggf. Tandem Pessare) im mittleren Vaginaldrittel (Abb. unten) gelegt.




Tandem Pessar

Größe	Artikel Nr.	Pharma-Nr.	Informationen zum Pessar
variabel	TP	PZN: 852 67 47	Indikation: Extreme Scheiden- und Gebärmuttersenkung.
Das Tandem Pessar besteht aus zwei aneinander gekoppelten Würfeln. Die konkaven Flächen bewirken die gute Haftung.			

Tandem Pessar perforiert


Größe	Artikel Nr.	Pharma-Nr.	Informationen zum Pessar
variabel	TPL	PZN: 063 38 92	Das Tandem Pessar kann auch bei Stressinkontinenz nützlich sein. Dann übernimmt der untere Würfel die Stützfunktion der Harnröhre und der obere Würfel garantiert mehr die Haftung des Pessars.
Das Tandem Pessar besteht aus zwei aneinander gekoppelten Würfeln. Die konkaven Flächen bewirken die gute Haftung.			

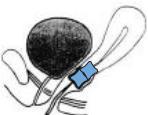




Urethra Pessar

Größe	Artikel Nr.	Pharma-Nr.	Informationen zum Pessar
45 mm	UP 045	PZN: 480 59 01	Indikation: Stressinkontinenz, Mischformen von Stress- und Urgeinkontinenz. Es sollte möglichst noch keine Operation vorliegen. Ein tragfähiger Beckenboden wird vorausgesetzt. Das Urethra Pessar besitzt eine Federkerneinlage. Die Kalotte soll den Übergang der Blase zur Harnröhre verlagern und unter Belastungssituationen ein Eröffnen der oberen Harnröhre verhindern.
50 mm	UP 050	PZN: 480 59 18	
55 mm	UP 055	PZN: 480 59 24	
60 mm	UP 060	PZN: 480 59 30	
65 mm	UP 065	PZN: 480 59 47	
70 mm	UP 070	PZN: 480 59 53	
75 mm	UP 075	PZN: 480 59 76	
80 mm	UP 080	PZN: 480 59 82	
85 mm	UP 085	PZN: 480 59 99	
90 mm	UP 090	PZN: 480 60 07	
95 mm	UP 095	PZN: 480 60 13	
100 mm	UP 100	PZN: 480 60 36	

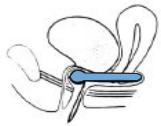


Urethraschalen Pessar

Größe	Artikel Nr.	Pharma-Nr.	Informationen zum Pessar
55 mm	USP 055	PZN: 480 60 42	Indikation: Stressinkontinenz, Mischformen von Stress- und Urgeinkontinenz. Es sollte möglichst noch keine Operation vorliegen. Ein tragfähiger Beckenboden wird vorausgesetzt. Die Funktionsweise ist ähnlich dem Urethra Pessar. Zudem wird eine mit der Inkontinenz eventuell kombinierte Senkung durch die Schale besser zurückgehalten.
60 mm	USP 060	PZN: 480 60 59	
65 mm	USP 065	PZN: 480 60 65	
70 mm	USP 070	PZN: 480 60 71	
75 mm	USP 075	PZN: 480 60 88	
80 mm	USP 080	PZN: 480 60 94	
85 mm	USP 085	PZN: 480 61 02	
90 mm	USP 090	PZN: zzt. ohne	

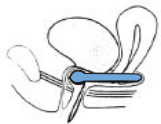

Hodge Pessar

Größe	Artikel Nr.	Pharma-Nr.	Informationen zum Pessar
55 mm	HP 055	PZN: 852 66 64	Indikation: Zur Behandlung von Inkontinenz und Senkung, wenn durch erfolglose Voroperationen Ring Pessare nicht toleriert werden. Das Pessar besitzt einen Kern aus Aluminium, der eine Verformung bzw. Anpassung an individuelle Verhältnisse zulässt.
60 mm	HP 060	PZN: 480 63 78	
65 mm	HP 065	PZN: 480 63 84	
70 mm	HP 070	PZN: 480 63 90	
75 mm	HP 075	PZN: 480 64 09	
80 mm	HP 080	PZN: 480 64 15	
85 mm	HP 085	PZN: 480 64 21	
90 mm	HP 090	PZN: 480 64 38	
95 mm	HP 095	PZN: 480 64 44	

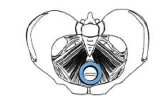

Keulen Pessare


Größe	Artikel Nr.	Pharma-Nr.	Informationen zum Pessar
50 mm	KP 050	PZN: 480 58 12	Indikation: Scheiden- und Gebärmuttervorfall, wenn normale Pessare dem Druck nicht standhalten. Vor der Pessareinlage muss eine Reposition der vorgefallenen Organe erfolgen.
55 mm	KP 055	PZN: 480 58 29	
60 mm	KP 060	PZN: 480 58 35	
65 mm	KP 065	PZN: 480 58 41	
70 mm	KP 070	PZN: 480 58 58	
75 mm	KP 075	PZN: 480 58 64	
80 mm	KP 080	PZN: 480 58 70	
85 mm	KP 085	PZN: 480 58 87	
90 mm	KP 090	PZN: 480 58 93	





Cerclage Pessar Typ A (ungelocht)

Größe	Artikel Nr.	Pharma-Nr.	Informationen zum Pessar
65/17/32	CA 65/17/32	PZN: 480 55 39	Indikation: Für Schwangere, bei denen eine Entlastung und sakrale Ausrichtung des Muttermundes erzielt werden soll (Prophylaxe Frühgeburt, z.B. bei belasteter Anamnese, Mehrlingsgravidität, Senkungsklagen). Die wichtigste Indikation wird durch Vaginalsonographie der Cervix gestellt. Vor der Applikation Infektion ausschließen!
65/17/35	CA 65/17/35	PZN: 480 55 74	
65/21/32	CA 65/21/32	PZN: 480 55 45	
65/21/35	CA 65/21/35	PZN: 480 55 80	
65/25/32	CA 65/25/32	PZN: 480 55 51	
65/25/35	CA 65/25/35	PZN: 480 55 97	
65/30/35	CA 65/30/35	PZN: 480 55 68	
70/17/32	CA 70/17/32	PZN: 480 56 05	
70/17/35	CA 70/17/35	PZN: 480 56 34	
70/21/32	CA 70/21/32	PZN: 480 56 11	
70/21/35	CA 70/21/35	PZN: 480 56 40	
70/25/32	CA 70/25/32	PZN: 480 56 28	
70/25/35	CA 70/25/35	PZN: 480 56 57	

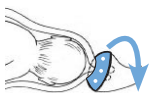


Cerclage Pessar Typ ASQ (perforiert)

Größe	Artikel Nr.	Pharma-Nr.	Informationen zum Pessar
65/17/32	ASQ 65/17/32	PZN: 480 56 63	Indikation: Für Schwangere, bei denen eine Entlastung und sakrale Ausrichtung des Muttermundes erzielt werden soll (Prophylaxe Frühgeburt, z.B. bei belasteter Anamnese, Mehrlingsgravidität, Senkungsklagen). Die wichtigste Indikation wird durch Vaginalsonographie der Cervix gestellt. Vor der Applikation Infektion ausschließen! Die Perforation erleichtert das Abfließen von Sekret.
65/17/35	ASQ 65/17/35	PZN: 480 57 17	
65/21/32	ASQ 65/21/32	PZN: 480 56 86	
65/21/35	ASQ 65/21/35	PZN: 480 57 23	
65/25/32	ASQ 65/25/32	PZN: 480 56 92	
65/25/35	ASQ 65/25/35	PZN: 480 57 46	
65/30/35	ASQ 65/30/35	PZN: 480 57 00	
70/17/32	ASQ 70/17/32	PZN: 480 57 52	
70/17/35	ASQ 70/17/35	PZN: 480 57 81	
70/21/32	ASQ 70/21/32	PZN: 480 57 69	
70/21/35	ASQ 70/21/35	PZN: 480 57 98	
70/25/32	ASQ 70/25/32	PZN: 480 57 75	
70/25/35	ASQ 70/25/35	PZN: 480 58 06	

Einlingsschwangerschaften

Mehrlingsschwangerschaften

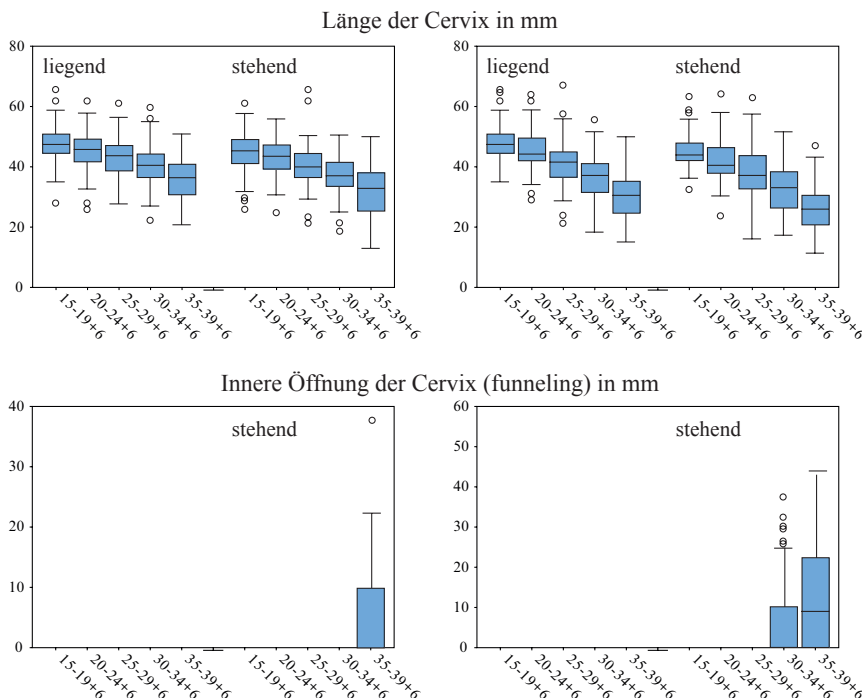

Normkurven (Transvaginalsonographie) von Länge und innerer Öffnung der Cervix im Stehen und Liegen für Ein- und Mehrlingsgravidität.

Werte der Cervixlänge unter der 25. Perzentile und der inneren Cervixöffnung über der 75. Perzentile liegen außerhalb der Säulen.





Göttinger Luftpessar

Größe	Artikel Nr.	Pharma-Nr.	Informationen zum Pessar
65 mm	GLP 065	PZN: 697 67 65	Indikation:
75 mm	GLP 075	PZN: 735 86 73	Scheiden- und Gebärmuttervorfall und/oder
85 mm	GLP 085	PZN: 735 86 96	Inkontinenz, bei denen die „normalen“ Pessare keine ausreichende Wirkung zeigen.

Die Wirkung beruht auf einer Verbesserung der Schließmuskelfunktion der Harnblase durch Anheben des Beckenbodens und eine abdichtende Wirkung durch einen leichten Druck auf die Harnröhre. Die Patientin oder ggf. Pflegepersonal kann das Göttinger Luftpessar wie einen Tampon in die Scheide einführen und entfernen.

Da das Göttinger Luftpessar nur bis zu 24 Stunden liegen bleiben darf, besteht keine Gefahr von Drucknekrosen.

Das Göttinger Luftpessar besteht aus 3 Teilen: dem eigentlichen Pessar (Endstück), einem Ventil und einem Pumpballon zum Aufblasen des Pessars

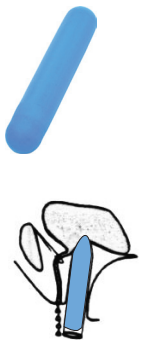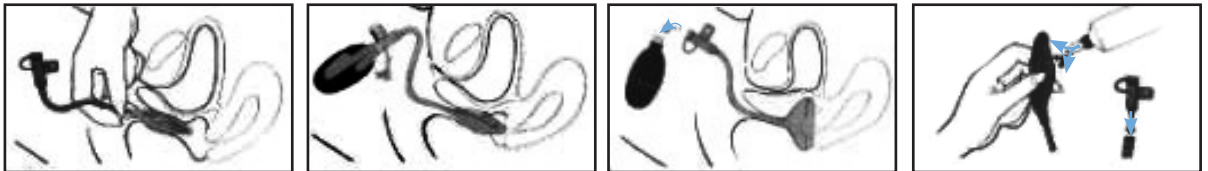

Scheidendehner

Größe	Artikel Nr.	Pharma-Nr.	Informationen zum Pessar
20/120 mm	SD-XS	PZN: zzt. ohne	Indikation:
26/127 mm	SD-S	PZN: 063 39 81	Dehnung der Scheide (Anlagestörungen,
30/112 mm	SD-M	PZN: 063 39 75	Zustand nach der Geburt und problematischer
37/137 mm	SD-L	PZN: 063 39 69	Naht der Epidiotomie, Zustand nach Operationen mit Verkleinerung und/oder Vernarbung der Vagina)

Musterpaket

Jede Arztpraxis kann sich ein Set aus 6 Pessaren unseres Sortimentes in gewünschter Größe (mit Ausnahme des Göttinger Luftpessars und des Tandem Pessars) zum Selbstkostenpreis von 50,-€ zusammenstellen.

Anpassungs-Set Ring

Das ringförmige Anpassungs-Set besteht aus jeweils 3 x 4 Ringen von flexiblem gewebefreundlichem Silikon. Die Ringe wurden im Gegensatz zu den therapeutischen Ring Pessaren ohne verstärkenden Stahlfederkern hergestellt und dienen nur dem Anpassen der richtigen Größe von verschiedenen zirkulär konstruierten Pessaren. Eine Umrechnungstabelle für Würfel liegt bei. Bei **Direktbestellung** können die ringförmigen Anpassungs-Sets für jeweils 25,-€ netto durch den Arzt erworben werden.

Größe	Artikel Nr.	Pharma-Nr.
Klein (50/55/60/65 mm)	Anpassung-Set Ring Klein	PZN: zzt. ohne
Mittel (65/70/75/80 mm)	Anpassung-Set Ring Mittel	PZN: zzt. ohne
Groß (85/90/95/100 mm)	Anpassung-Set Ring Groß	PZN: zzt. ohne

